

Conditionnement des échantillons biologiques



Enrouler chaque tube dans une feuille absorbante



Entourer le tout dans une feuille de papier à bulles



Préparation des sachets



Placer les deux tubes dans une pochette en plastique de petite taille et la fermer



Placer le tout dans le sachet BIOHAZARD



Fermer le sachet BIOHAZARD

Emballage du carton



Mettre dans le carton:

-le sachet BIOHAZARD

-la fiche d'accompagnement du prélèvement remplie et signée par le médecin investigateur

Fermer le carton



Mettre le carton dans le sachet en plastique transparent de grande taille et le fermer.

Coller un bordereau du transporteur sur le sachet en plastique en laissant le marquage UN3373 DIAGNOSTIC SPECIMEN visible

Transport

- Prévenir TNT avant 15h au 0 825 033 033 pour tout enlèvement le jour même en précisant l'adresse d'enlèvement.
- Prise en charge par TNT des paquets avant 19h.
- Livraison à la Fondation Jean Dausset-CEPH avant 13h le lendemain.
- Livraison le lundi pour les paquets enlevés le vendredi.
=> à éviter.